


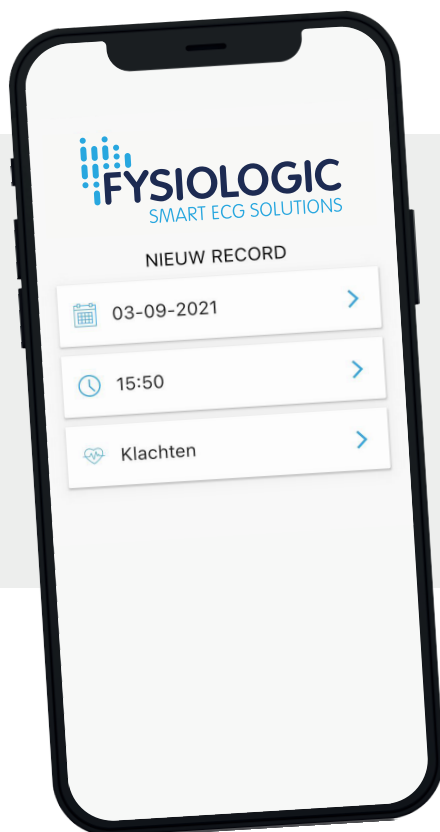

## OVER DE APP FYSIOLOGIC DAGBOEKJE

U heeft een ECG-recorder (Holter) ontvangen om uw hartritme te registreren. Daarnaast is u gevraagd uw klachten bij te houden in een dagboek. Met de app Fysiologic Dagboekje kunt u heel gemakkelijk uw dagboek bijhouden. Het enige wat u hoeft te doen is in de app uw klacht selecteren en de bijbehorende activiteit. De app vult zelf de datum en het tijdstip in. De gegevens worden automatisch naar Fysiologic verzonden.

## OVER FYSIOLOGIC ECG SERVICES


Fysiologic registreert en analyseert elektrocardiogrammen (ECG's) in opdracht van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Informatiebeveiliging vinden wij heel belangrijk. De gegevens die u via de app met ons deelt worden via een beveiligde verbinding naar ons verstuurd en volgens strenge procedures verwerkt. Wij zijn **ISO 27001 gecertificeerd** en **NEN 7510 geaccrediteerd**. Kijk voor meer informatie op onze website: [www.fysiologic.com](http://www.fysiologic.com).

## HOE WERKT DE APP?



### 1. STARTEN

- Download en installeer de app **Fysiologic Dagboekje** via de App Store of Google Play op uw smartphone.
- Scan vervolgens de QR-code die u bij de ECG-recorder heeft gekregen. Geef aan hoe laat uw ECG-recorder gestart is.

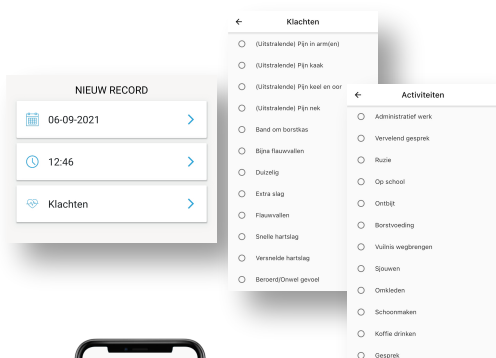

### 2. INVOEREN

- Open de app door op het icoon te tikken.
- Tik op **NIEUW RECORD** en u ziet drie buttons: datum, tijdstip en klachten.
- Datum en tijdstip hoeft u niet in te vullen. Dit doet de app zelf.
- Tik op de button **KLACHTEN**. Kies de klacht die u wilt invoeren.
- Geef bij **ACTIVITEITEN** aan wat u deed tijdens de klacht.

### 3. OPSLAAN

- Nadat u uw klacht(en) en activiteiten heeft ingevoerd, tikt u op **OPSLAAN**.
- U krijgt nu een overzicht van uw persoonlijke dagboek te zien.
- Tik eventueel op **NIEUW RECORD** om meer klachten en activiteiten in te voeren. Dit kan maximaal dertig keer.

